

عنوان روش اجرا: گندزدایی و استریل ارقام حساس به حرارت	
دامنه روش اجرا: پرسنل (کاردان - کارشناس) اتاق عمل - پرسنل CSR - پرسنل خدماتی اتاق عمل - کنترل عفونت - کد: ۱ / مدیریت استریلیزاسیون / ۲۳۱۰ صفحه:	تاریخ بازنگری: مهر ۹۵ تاریخ ابلاغ: آبان ۹۵

روش اجرایی :

- ۱) تمامی تجهیزات حساس به حرارت اتاق عمل و بیمارستان به دلیل نبود دستگاه استریل سرد با روشی غیرحرارتی توسط هر بخش استریل می شود ضد عفونی میگردند
- ۲) وسایل برقی و الکتریکی توسط پرسنل بخش معمولاً با بخار فرمالدئید ضد عفونی میگردند
- ۳) جهت یک سری از تجهیزات برقی و دارای فیبرنوری مانند میکروسکوپ ها قلم کوترها وسایل آندوسکوپی وازوفاگوسکوپی ، درل برقی از بخار فرمالین داخل یک ظرف یا چادر غیرقابل نفوذ آب و بخار استفاده می شود
- ۴) برای این کار پرسنل بخش مربوطه با قراردادان چندین عدد قرص داخل یک گاز (به دلیل پخش نشدن ذرات قرص) و قراردادان هم زمان وسیله مورد نظر با قرص ها در محیطی بسته این کار انجام شود
- ۵) قبل از استفاده از وسیله فوق پرسنل آن را با گاز آغشته به سرم نرمال سالین آب کشی و گرد گیری می کنند
- ۶) میکروسکوپ و چراغ اتاق عمل توسط پرسنل (کاردان و یا کارشناس اتاق عمل) در شستشوی روزانه بعد از استفاده بادستمال آغشته به محلول ضد عفونی موجود تمیز میشود
- ۷) دستگیره های مخصوص این ابزار توسط واحد CSSD استریل شده تا در عمل بعدی استفاده شود

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
مرکز آموزشی درمانی شهید مظلوم دکتر بهشتی

امکانات :

داروهای ضروری برای استریل (فرمالدئید و...) - ظرف یا چادر غیرقابل نفوذ آب و بخار - محلول های ضد عفونی کننده موجود

کارکنان مرتبط :

پرسنل (کاردان - کارشناس) اتاق عمل - پرسنل CSR - پرسنل خدماتی اتاق عمل

تهیه کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

عنوان روش اجرا: نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته بیمار	
دامنه روش اجرا: پرسنل پرستاری بخش و یا پرسنل سیرکولر-پرسنل	تاریخ بازنگری: مهر ۹۵
CSR	تاریخ ابلاغ: آبان ۹۵
کد: ر ۱ / مدیریت استریلیزاسیون / ۲۳۱۱	
صفحه:	

روش اجرایی :

- در زمان پگ و بسته بندی در واحد cssd پرسنل پک کننده باید در داخل کلیه ست ها ایندکس مناسب قرار دهد
(زیر ۵ قلم ابزار ایندکس کلاس ۴ و بیشتر از ۵ قلم ابزار ایندکس کلاس ۶)
- بر روی ست ها توسط پرسنل پک کننده ایندکس کلاس ۲ نصب می شود
- در زمان جراحی و یا استفاده از ست ، پرسنل مربوطه (پرسنل پرستاری بخش و یا پرسنل سیرکولر) باید ایندکس فوق را از ست خارج نموده و حفظ کند
- پس از پایان کار پرسنل پرستاری بخش و یا پرسنل سیرکولر اتاق عمل ایندکس فوق را به شرح عمل الصاق مینماید
- چنان چه پس از انجام عمل جراحی یا بخیه یا ... بیمار دچار عفونت ثانویه شود با مراجعه به پرونده در مورد استریل بودن ست با توجه به ایندکس الصاق شده ، توسط مسئولین ذی صلاح تصمیم گیری می شود

امکانات :

ایندکس های مناسب ست های پانسمان (کلاس های مختلف) - پارچه و یا کاغذ برای بستن ست های پانسمان

کارکنان مرتبط :

پرسنل پرستاری بخش - پرسنل سیرکولر - پرسنل CSR

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

مرکز آموزشی درمانی شهید مظلوم دکتر بهشتی

تصویب کننده:

تأیید کننده:

تهیه کننده: